

# Умный массажер для глаз


Руководство Пользователя



# ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

---

Постоянное использование различных гаджетов вроде смартфона, планшета и ноутбука приводит к негативным последствиям для глаз: развитие близорукости, сухость, усталость глазных мышц, появление мешков и т.д.

**БОРОТЬСЯ С ЭТИМ МОЖНО И НУЖНО.**

Эффективным методом борьбы с дряблостью кожи и усталостью глаз является массажер для глаз.

Он эффективен при появлении нечеткости зрения в результате утомления глаз, работы за компьютером или длительного вождения, благодаря своему функционалу.



## МЯГКИЙ ПРОГРЕВ:

- повышает эффективность массажа;
- расслабляет и восстанавливает мышцы;
- помогает быстрее снять напряжение и усталость глаз;

## ВИБРОМАССАЖ:


- снимает головную боль;
- приводит мышцы лица в тонус;
- ускоряет кровообращение, за счет чего кожа насыщается кислородом и получает много питательных веществ;

## ЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ


- помогает расслабиться и получать удовольствие;
- положительно влияет на нервную систему и качество сна;
- вы можете слушать свою любимую музыку или звуки природы, подключив телефон к массажеру;
- прослушивание музыки во время сеанса массажа создаст приятную атмосферу и будет направлено на максимальное расслабление и восстановление работоспособности.



## КРАТКАЯ СХЕМА

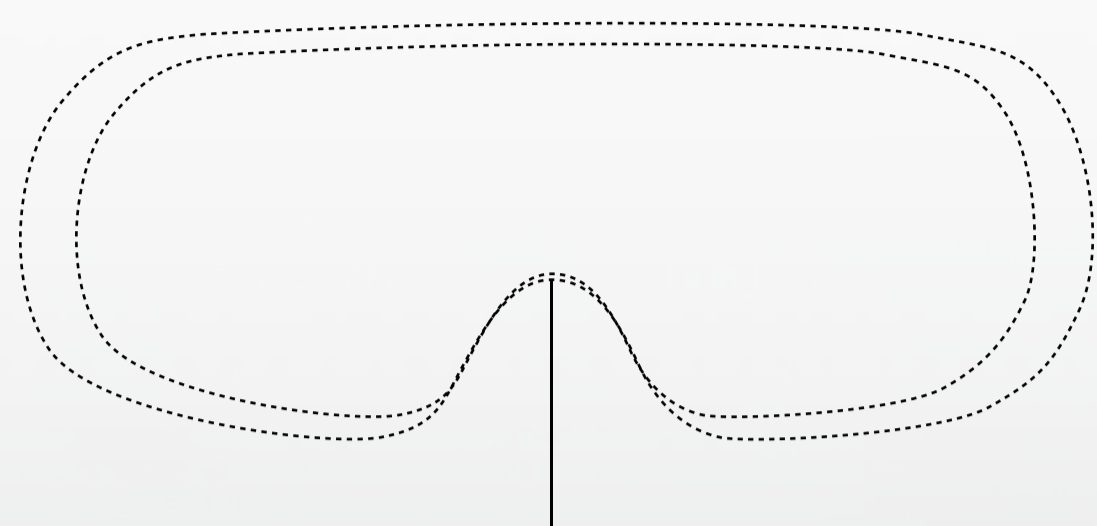

USB - порт

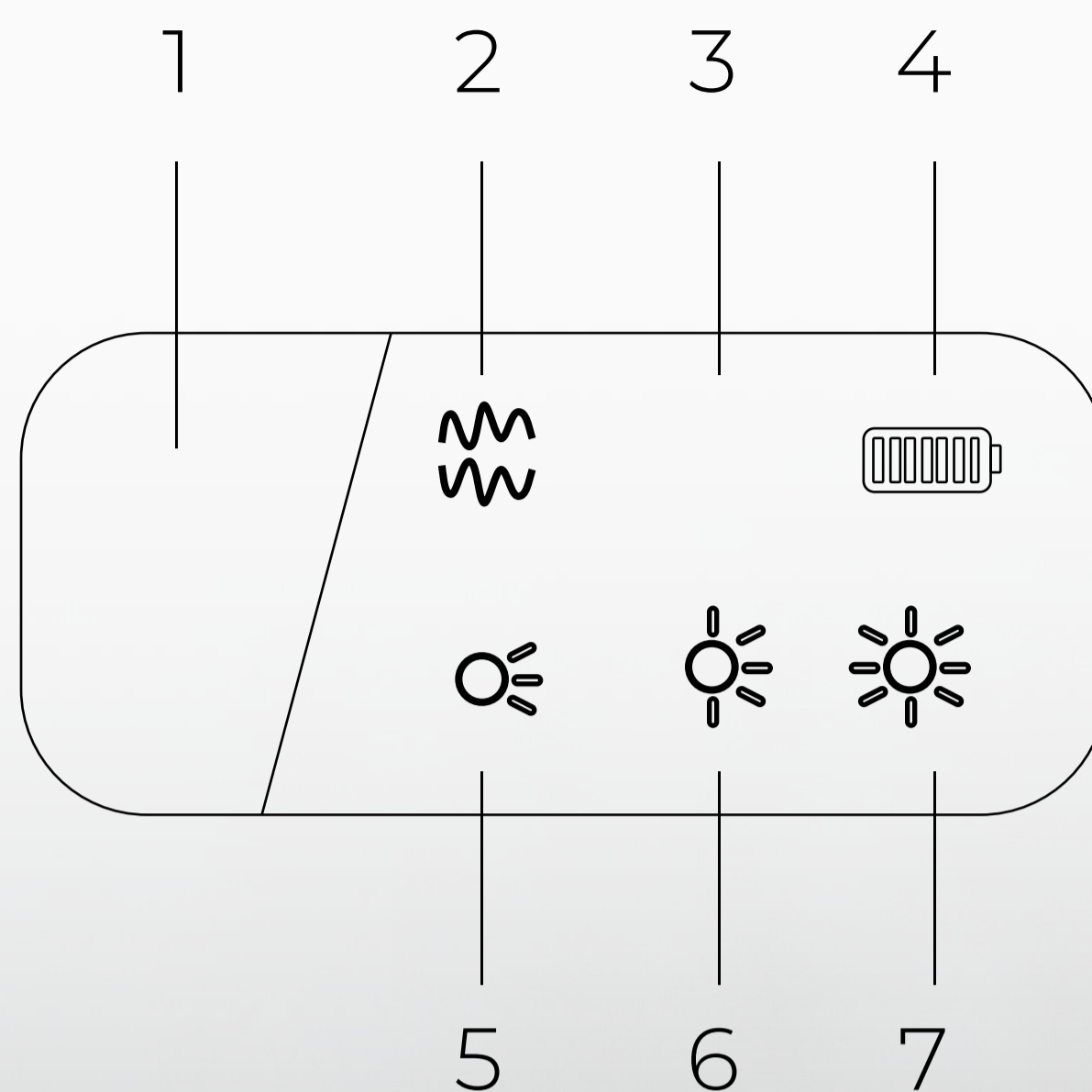

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Кнопка Вкл/Выкл    | 5. Голубой индикатор |
| 2. Индикатор вибрации | 6. Желтый индикатор  |
| 3. Bluetooth          | 7. Красный индикатор |
| 4. Индикатор заряда   |                      |



## **ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ**

Для зарядки сложите устройство, посередине на нижней части корпуса вы найдете вход для USB кабеля (идет в комплекте).

Пожалуйста, используйте адаптер постоянного тока на 5В/1А-2А, чтобы зарядить устройство. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АДАПТЕР МОЩНОСТЬЮ БОЛЬШЕ 5В.

Проверьте соответствующий индикатор. Пожалуйста, не используйте устройство во время зарядки. Если устройство издаёт звуки, похожие на «Ду-ду», то необходимо поставить его на зарядку. Долгое использование устройства с низким зарядом аккумулятора приведёт к проблемам с зарядкой.

## **КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?**

Удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, чтобы включить прибор.

### **ПРОГРЕВ:**

1. При первом включении будет работать низкотемпературный режим накладки для глаз, загорится синий индикатор;
2. Нажмите на кнопку включения один раз, чтобы нагреть накладку до обычного состояния - жёлтый индикатор;
3. Нажмите на кнопку включения ещё раз, чтобы ещё больше нагреть накладку - красный индикатор;
4. Нажмите на кнопку включения ещё раз, чтобы максимально нагреть накладку - будут гореть три индикатора сразу.

## ВИБРОМАССАЖ:

1. Двойное нажатие - включение вибрации;
2. Нажать ещё один раз – переключение в более интенсивный режим;
3. Нажать ещё 2 раза – переключение в исходный режим.

## ЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ:

1. Зайдите в настройки вашего телефона, включите Bluetooth и присоединитесь к устройству с названием SHU SEN;
2. При подключении массажер издаст характерный звук, это значит, что массажер подключился к вашему телефону;
3. Включите музыку для релаксации через привычное для вас приложение и наслаждайтесь массажем.

## ПОКАЗАНИЯ:

1. Для людей с мелкими морщинами вокруг глаз и темными кругами;
2. Для людей, страдающих от головной боли, глазной боли и бессонницы;
3. Для людей, страдающих от близорукости, стресса, астигматизма, усталости глаз.

Для зарядки сложите устройство, посередине на нижней части корпуса вы найдете вход для USB кабеля (идет в комплекте).

## **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА И ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ**

### **1. Снятие напряжения и усталости глазных мышц**

Массаж в течение 5 минут может полностью снять напряжение глаз, понизить внутриглазное давление и улучшить кровоснабжение глазного яблока и мышц.

Массажер быстро уменьшает отечность век, способствует рассасыванию гематом, восстановлению слезной пленки, снимает гиперчувствительность глаз к яркому свету, вызванному переутомлением глазных мышц.

Рекомендуется проводить не менее 3 раз в день.





## **2. Уменьшение симптомов стресса и усталости (мешки и круги под глазами)**

Массаж 2 раза в день в течение 30 - 40 дней способствует уменьшению мешков под глазами (образованных скоплением жировой ткани и воды) и темных кругов, возникающих в результате недосыпания, переутомления и недостаточного кровоснабжения.

## **3. Улучшение функций головного мозга и нормализация сна**

Массаж в течение 5-10 минут ежедневно перед сном способствует быстрому достижению фазы глубокого сна. Массажер можно применять при нарушении сна и бессоннице, вызванной неврастенией или тревожными состояниями.

## **4. Уменьшение глубины морщин вокруг глаз и повышение эластичности кожи**

Ежедневный массаж в течение 5-10 минут значительно повышает эластичность кожи, стимулирует обмен веществ в клетках кожи, что обеспечивает выравнивание поверхности и цвета кожи, уменьшение глубины и количества морщин. Применение специальных средств для кожи вокруг глаз повысит эффективность массажа.

## **5. Близорукость**

Для быстрого и устойчивого эффекта достаточно в течение 3 дней проводить массаж 3 раза в день по 3 - 5 минут. Это приводит к улучшению работы аппарата аккомодации, снятию спазма аккомодации и повышению остроты зрения.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Рекомендуемое время использования в одном из режимов - 10 минут. При долгом использовании может возникнуть чувство дискомфорта. В массажере установлен таймер, по окончании которого устройство самостоятельно выключится;
- Пожалуйста, не используйте устройство после закапывания капель;
- Пожалуйста, не используйте устройство, если на вашем лице есть маска;
- Пожалуйста, не используйте устройство во время зарядки;
- Если вы чувствуете жар в глазах, то немедленно выключите аппарат.



## РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ

- Протирайте массажер мягкими и сухими тканевыми салфетками;
- Не используйте воду для чистки устройства;
- Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, мебельные полироли или их растворы;
- Не чистите устройство во время зарядки.



## ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Проблема	Причина	Решение
Устройство не заряжается или ни один из индикаторов не горит во время зарядки	Устройство долгое время не использовалось, при этом батарея была немного заряжена	Полностью зарядите батарею
Горят все индикаторы или слышен звук, похожий на «Да-да»	Устройство долгое время не использовалось, при этом батарея была немного заряжена	Полностью зарядите батарею
Звучит громкий звук во время зарядки	Устройство долгое время не использовалось, при этом батарея была немного заряжена	Полностью зарядите батарею
Чувствуете, что недостаточно тепла в тёплом режиме работы	Низкий заряд аккумулятора	Полностью зарядите батарею
Не работает тёплый режим	Это вызвано состоянием сети	Полностью зарядите батарею
Слишком сильное давление	Неправильная настройка длины фиксатора для головы	Настроить фиксатор
Как отследить ситуацию с зарядом	По цвету индикатора	Индикатор будет мигать во время зарядки. Когда устройство зарядится полностью, индикатор перестанет мигать.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Массажер для глаз
Источник питания	Зарядное устройство (встроенная литиевая батарея на 3.7В 500мАч)
Время полной зарядки	Около 3 часов
Время непрерывной работы	Около 60 минут
Время одного использования	Около 10 минут
Температура в теплом режиме	38° — 40°. Максимальная температура нагрева 42°
Диапазон температур работы	0° — 42°
Размер	210*78*26 мм
Вес	158 ± 5г

**ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ** ✓



### ТЕХПОДДЕРЖКА

Напишите нам в любом удобном для Вас мессенджере.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Зарегистрируйте товар на сайте [www.evo-beauty.ru](http://www.evo-beauty.ru) и получите расширенную гарантию.

